

ANVÄNDARINSTRUKTION vadsite®

1. Använd aseptisk teknik för att ta vadsite® ur förpackningen. Produkten ansluts till I.V. katetern, förlängningsslangen eller 3-vägskranen genom att skruva den medurs.
2. Desinficera membranet enligt sjukhusets gällande rutiner, dock under minst fem sekunder och låt verka i ytterligare trettio sek.
3. Koppla en fylld förlängningsslang eller spruta till vadsite® genom att vrida medurs tills den sitter fast*.
4. Koppla isär genom att vrida sprutan eller infusionsslangen moturs.
5. Efter användning - spola igenom vadsite® med NaCl och desinficera membranet.



*Vid användande av Luer-slip spruta skall den vridas ett kvarts varv samtidigt som den trycks in i membranet.