


Bruksanvisning

CPAP Boussignac

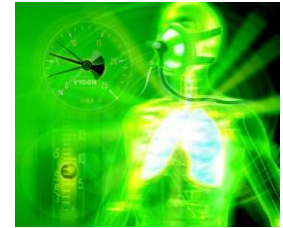

Uppskattad FiO2 när PEEP ställs in med andningsluft och extra syrgas tillsätts.

PEEP cm/H2O	Önskad FiO2 nivå (%)											
	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
1	<1	<1	<1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
2	<1	<1	1	2	3	4	4	4	5	5	6	6
3	<1	<1	1	2	3	4	5	6	6	7	7	8
4	<1	<1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	<1	<1	1	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6	<1	1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13
7	<1	1	2	5	6	7	9	10	11	12	13	15
8	1	2	3	5	7	9	10	12	14	15	16	17
9	1	2	4	6	8	10	12	13	15	17	18	19
10	1	2	4	6	8	10	13	14	15	18	19	20

Exempel: Vid PEEP 5 cm/H2O och önskad FiO2 på 40% behövs ett syrgastillägg med 3 lit/min.

OBSERVERA: Ovanstående tabell skall ses som en vägledning och är ej exakta värden.

Kontrollera alltid patientens SaO2 vid behandling och reglera tillägg av syrgas därefter.