

Bruksanvisning CPAP Boussignac



O2/Luft



Ansiktsmask



CPAP-generator



Manometer/slang



Fixering



1. CPAP-generatorns gröna slang kopplas till gaskällan (O2 alt. luft)
2. Placera CPAP-generatorn (vita delen) i maskens öppning.



1. Fäst manometerslangen i manometern.
2. Koppla den till porten i CPAP-generatorn



Håll ansiktsmasken mot en plan yta (t.ex. en bordsskiva). Ställ in PEEP genom att reglera flödet på luft alt. syrgas.



Placera masken över patientens näsa/mun så att den sluter tätt och sitter bekvämt. Fixera masken vid behov.

Du vet väl att:

- * CPAP-behandling sker enligt läkarordination.
- * Du enkelt kan justera PEEP under behandling genom att öka/minska flödet av luft/O2
- * Den orangefärgade ringen på manometern ska tryckas in när du vill lossa manometerslangen.
- * Ansiktsmasken är kuffbar.
- * OBS! Håll ej handen över CPAP-generatorns öppning vid inställning av PEEP.

Kontakta oss gärna för mer information:

Vygon (Sweden) AB, Högströmsgatan 16, 931 33 Skellefteå
Tel: 0910-884 50 Fax: 0910-884 54 info@vygon.se