


Inställning av syrgaskoncentration



Alternativ 1 Med FIO2-regulator

Driv ALLTID CPAP Boussignac på syrgas

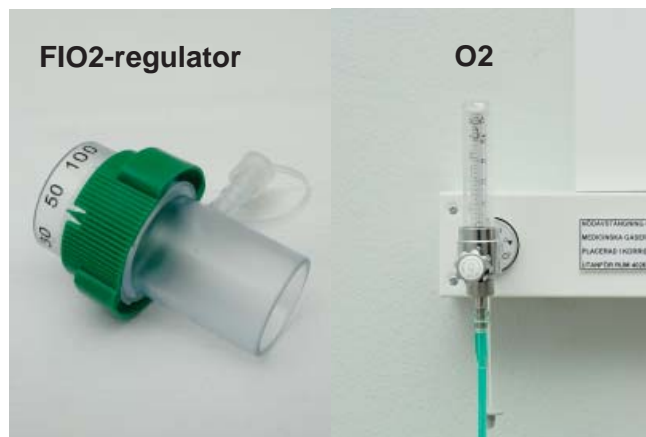

Med FIO2-regulatorn kan syrgaskoncentrationen enkelt ställas in på 30, 50 eller 100% syrgas. Koppla CPAP-generators gröna slang till flödesmätare för O2.



Placera FIO2-regulatorn mellan mask och CPAP-generator. Ställ in önskad syrgaskoncentration på FIO2-regulatorn. Stäng porten på CPAP-generatorn.



Koppla manometerslangen till porten till FIO2-regulatorn. Ställ in PEEP enligt instruktion på föregående sida. OBS! Om syrgashalten ändras under behandling ska PEEP ställas in på nytt!

Alternativ 2 Med extra syrgasslang

Driv ALLTID CPAP Boussignac på luft



Koppla CPAP-generators gröna slang till flödesmätare för luft. Ställ in PEEP enligt instruktion på föregående sida. Koppla sedan bort manometern.



Anslut syrgasslangen till flödesmätaren för syrgas och koppla andra änden av syrgasslangen till porten på CPAP-generatorn.

Bruksanvisning CPAP Boussignac



Uppskattad FIO2 när PEEP ställs in med andningsluft och extra syrgas tillsätts.

| PEEP cm/H2O | Önskad FIO2 nivå (%) | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 1 | <1 | <1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | <1 | <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | <1 | <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 4 | <1 | <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | <1 | <1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | <1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | <1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 |

Exempel: Vid PEEP 5 cm/H2O och önskad FIO2 på 40% behövs ett syrgastillslag med 3 lit/min.

OBSERVERA: Övanstående tabell skall ses som en vägledning och är ej exakta värden. Kontrollera alltid patientens SaO2 vid behandling och reglera tillägg av syrgas därefter.

Vygon (Sweden) AB, Högströmsgatan 16, 931 33 Skellefteå
Tel: 0910-884 50 Fax: 0910-884 54 info@vygon.se



Gör tillägg av syrgas enligt tabell.

Kontakta oss gärna för mer information:

Vygon (Sweden) AB, Högströmsgatan 16, 931 33 Skellefteå
Tel: 0910-884 50 Fax: 0910-884 54 info@vygon.se