

ANVÄNDARINSTRUKTION

bionector[®]

1. Använd aseptisk teknik för att ta **bionector**[®] ur förpackningen. Vid hårt skyddshölje – skruva fast **bionector**[®] på I.V. katetern, förlängningsslangen eller 3-vägskranen, gör en lätt brytning (vickning) och avlägsna därefter skyddshöljet.
2. Desinficera membranet enligt sjukhusets gällande rutiner, dock under minst fem sekunder och låt verka i ytterligare trettio sek.
3. Koppla en fylld förlängningsslang eller spruta till **bionector**[®] genom att vrida medurs tills den sitter fast*.
4. Koppla isär genom att vrida sprutan eller infusionsslangen moturs.
5. Efter användning - spola igenom **bionector**[®] med NaCl och desinficera membranet.



* Vid användande av Luer-slip spruta skall den vridas ett kvarts varv samtidigt som den trycks in i membranet.