


NEONATOLOGI

Tillbehör

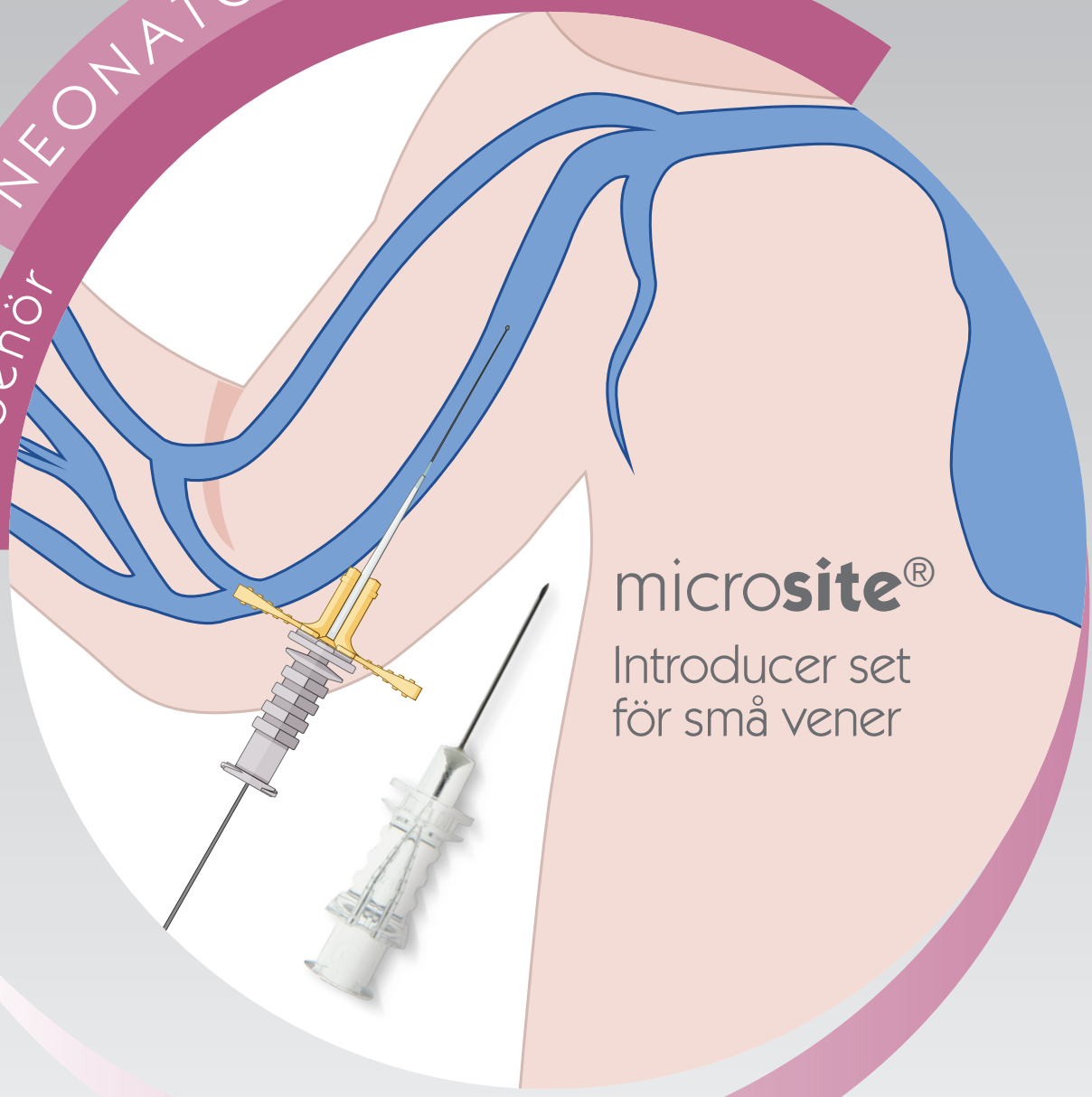

**microsite<sup>®</sup>**  
Introducer set  
för små vener



Value Life

## ● Modifierad Seldinger Teknik (MST) för neonatala PICC line

- Ökad precision
- Underlättar skapande av venös access hos svårstuckna patienter<sup>(1)</sup>
- Reducerar risken för flera punktioner och venöst trauma<sup>(2)</sup>
- Ökar antalet framgångsrika inläggningar<sup>(2)</sup>

“ Med denna produkt kan centrala venkatetrar i 2 Fr på ett säkert sätt läggas in genom perifera vener.<sup>(3)</sup> ”

## ● **microsite**: Ett MST kit designat för prematura barn.

### Microsite underlättar inläggning av neonatala PICC lines

- När blodkärlen är små eller av dålig kvalitet
- Om venerna är svåra att se
- Om det är en stor risk för venös kollaps

### Microsite minimerar det venösa traumat


- 24G punktionsnål
- Atraumatisk knickfri ledare
- Jämn och fin avfasning mellan dilatator och den delbara introducerhylsan

### Microsite medför en precis och framgångsrik inläggning


- Den transparenta luerkopplingen på punktionsnålen möjliggör en direkt visualisering av blodsvaret.
  - Den svarta markeringen på ledaren markerar längden på nålen.
- Så snart den svarta markeringen är passerad så är ledaren inne i venen.




● Punktionsnål - 19 mm / 24 G

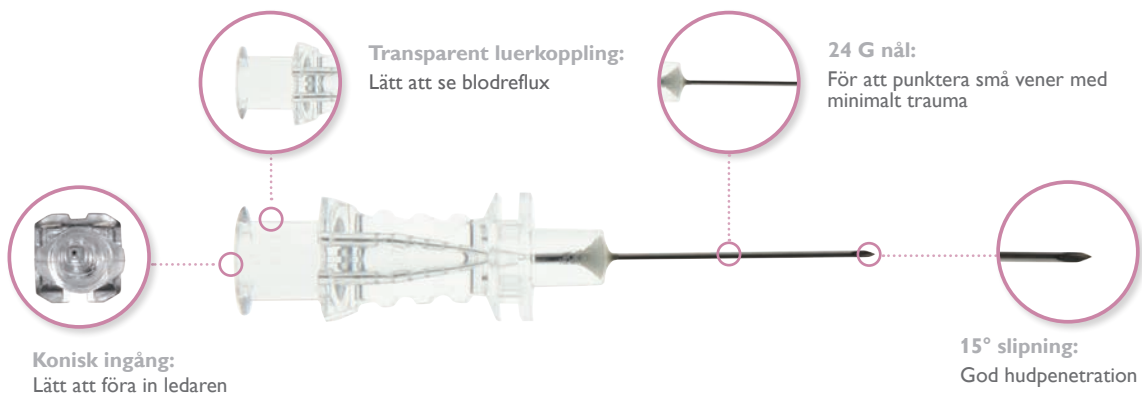

● Symmetrisk Nitinol ledare - 20 cm

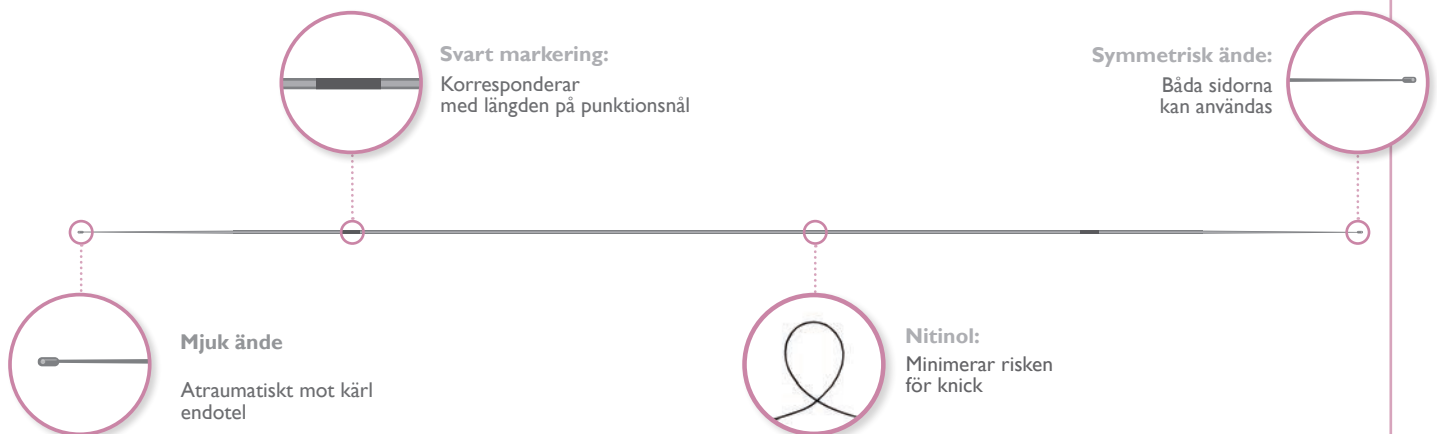

● Delbar introducer och dilatator för 1 Fr & 2 Fr katetrar - 18 mm / 20 G

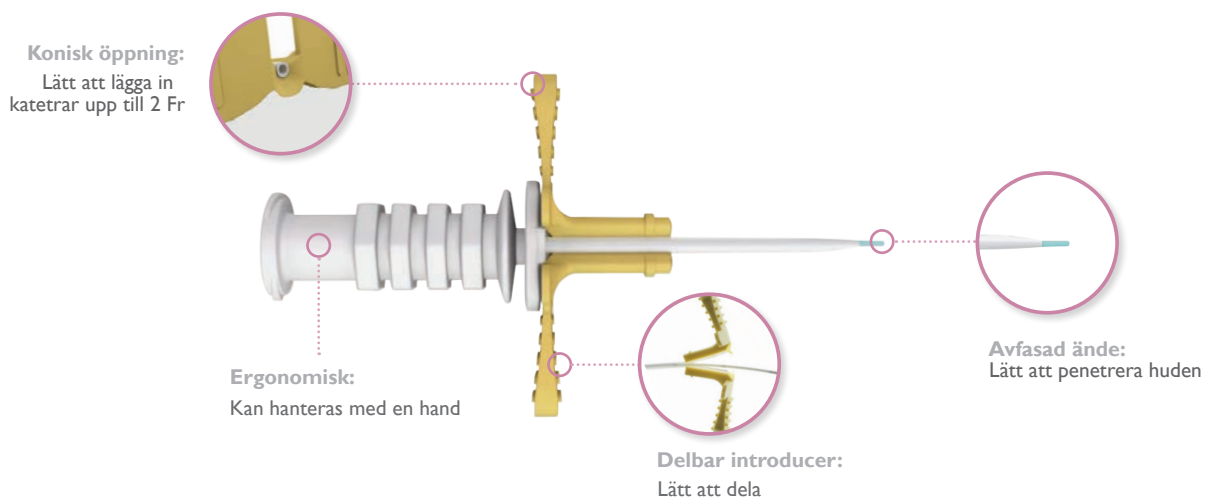

## Procedur



Punktion



För in ledaren



Dra ut nålen



För på introducer & dilatator



Avlägsna ledare & dilatator



Lägg in katetern

Art:nr	Storlek	Kompatibel med	Antal
microsite 1147.02	För inläggning av 1 Fr & 2 Fr katetrar	premicath epicutan <sup>neo</sup> cava epicutan <sup>neo</sup> 2 nutriline nutriline twinflo	10/kartong

## Referenser

- (1) NANN. Peripherally Inserted Central Catheters: Guideline for Practice, 2nd Edition, 2007.
- (2) Petit J. Technological Advances for PICC Placement and Management. Adv Neonatal Care. 2007; 7 (3) : 122-31
- (3) Modified Seldinger Technique for 2-French peripherally inserted central venous catheters – Archives of Disease in Childhood 2008;93:ps368

För ytterligare information, vänligen kontakta: [info@vygon.se](mailto:info@vygon.se)

The specifications shown in this leaflet are for information only and are not, under any circumstances, of a contractual nature.

Vygon (Sweden) AB Högströmögatan 16 931 33 Skellefteå  
Telefon: 0910-884 50  
Fax 0910-884 54  
[www.vygon.se](http://www.vygon.se)



[www.vygon.com](http://www.vygon.com)