


# Användarinstruktion

**CPAP Boussignac<sup>®</sup>**

**Enkel, Säker och Effektiv**

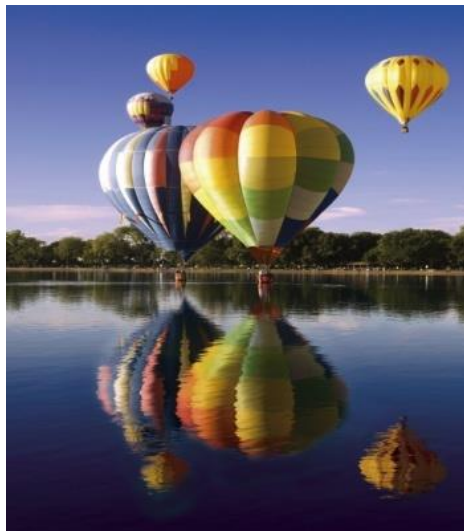

**CPAP Boussignac<sup>®</sup> är en höglödes – CPAP.**

**Följ alltid de föreskrifter som finns vad gäller  
indikationer/kontraindikationer samt övervakning**

***Detta är endast en vägledning som naturligtvis är underordnad  
de lokala föreskrifter som finns samt läkares ordination***

**Instruktionsfilm CPAP Boussignac<sup>®</sup> finns på**

**<http://www.vygon.se/broschyer/>**

## CPAP Boussignac<sup>®</sup> enkel bruksanvisning

1. Placera den vita filterdelen av CPAP – generatoren i maskens öppning.
2. CPAP – generatorns gröna slang kopplas till gaskällan (syrgas alternativt luft).
3. Fäst manometerslangen i manometern och koppla till den lediga porten i CPAP – generatoren.
4. Håll CPAP – masken mot en slät yta (t.ex. en bordsskiva).  
OBS! Håll EJ handen över CPAP – generatorns öppning.
5. Öppna flödesmätaren och vrid upp till manometern visar önskat motstånd (PEEP). Följ läkares ordination alt. det motstånd ni brukar använda – PEEP 5 eller 7,5 cm H<sub>2</sub>O. Det går utmärkt att ställa in både högre och lägre motstånd.
6. Koppla bort manometern.
7. Placera masken över patientens ansikte så att den sluter tätt och sitter bekvämt.
8. Använd fixeringsband vid behov.

## CPAP Boussignac<sup>®</sup> och nebulisering

1. Fyll behållaren med ordinerat läkemedel.
2. Placera nebulisatorn mellan mask och CPAP – generatoren.
3. Koppla CPAP – slangen till flödesmätaren för syrgas alt luft.
4. Ställ in ordinerat motstånd. Koppla bort manometerslangen.
5. Koppla slang mellan nebulisator och flödesmätare för andningsluft alt syrgas och vrid upp flödet till 6 l/min.



## FiO<sub>2</sub> regulator

Tillsammans med FiO<sub>2</sub> regulatorn (art.nr 5566.02) skall CPAP **Boussignac**® alltid drivas på syrgas. Med FiO<sub>2</sub> regulatorn kan syrgaskoncentrationen enkelt ställas in till 30 %, 50 % eller 100 %.



1. Placera FiO<sub>2</sub> regulatorn mellan mask och CPAP generatoren.
2. Koppla CPAP slangen till flödesmätare för syrgas.
3. Stäng manometerporten på CPAP generatoren.
4. Koppla manometerslangen till porten på FiO<sub>2</sub> regulatorn.
5. Vrid ringen på FiO<sub>2</sub> regulatorn till önskad syrgaskoncentration.
6. Ställ därefter in önskat PEEP (ju lägre syrgas-koncentration desto högre flöde för att ställa in PEEP).
7. Om syrgaskoncentrationen ändras under behandling måste PEEP ställas in på nytt.

## CPAP kombinerat med inhalation

CPAP behandling med CPAP **Boussignac**® och samtidig inhalation via nebulisator är möjlig (se instruktioner på föregående sida). Finns att beställa i färdiga set (se sista sidan).

## Befuktning

Behovet av befuktning bör anpassas individuellt. CPAP **Boussignac**® är ett öppet system vilket bl.a innebär att patienten självbefuktas sig genom andningen. Vid längre tids kontinuerlig användning rekommenderas befuktning.

**Produktsortiment:**

<b>Art.nr</b>	<b>Benämning</b>	<b>Avd.förp/st</b>
5561.300	CPAP 3, komplett kit – Barn	1
5561.400	CPAP 3, komplett kit – Small	1
5561.500	CPAP 3, komplett kit – Medium	1
5561.600	CPAP 3, komplett kit – Large	1
5571.300	CPAP 3, komplett kit m. nebulisator – Barn	1
5571.400	CPAP 3, komplett kit m. nebulisator – Small	1
5571.500	CPAP 3, komplett kit m. nebulisator – Medium	1
5571.600	CPAP 3, komplett kit m. nebulisator – Large	1
5570.13	CPAP 3, kit utan mask	5
5557.350	Mask – Barn, luktfri	5
5557.450	Mask – Small, luktfri	5
5557.550	Mask – Medium, luktfri	5
5557.650	Mask – Large, luktfri	5
527.01	Manometer – Precision $\pm 0,4$ cm H <sub>2</sub> O	1
555.01	Adapter till endotrachealtub/trachealkanyl	20
5558.053	CPAP 3, extraslang till manometer	10
5558.62	CPAP 3, extraslang för syrgas/luft	10
5558.91	Ljuddämpare	10
5566.02	FiO <sub>2</sub> regulator	5
NB-31193	Nebulisator för CPAP	50
5559.01	Fixeringsband, Silikon	5
5559.03	Fixeringshuva, tyg, elastisk	10
5563.34	Flödesmätare – Luft standard 4,5 bar	1
5563.3402	Flödesmätare – Luft m 0,5 slang och hållare	1
5563.44	Flödesmätare – Syrgas standard 4,5 bar	1
5563.4402	Flödesmätare – Syrgas m 0,5 slang och hållare	1
5563.84	Flödesgivare 50 l/min	1