

# Instruktion för anslutning av nebulisering till CPAP Boussignac



**1**

Välj rätt storlek på  
**ansiktsmasken (S/M/L)**

**2**

Anslut **T-kopplingen** till  
ansiktsmasken

**3**

Fyll **nebuliseringskopp**en  
med ordinerat läkemedel

**4**

Anslut förlängningsslangen till  
**nebuliseringskopp**en och till  
drivkällan (**luft alt. syrgas**)  
Flöde 6 l/min

**5**

Anslut **nebuliseringskopp**en till  
**T-kopplingens** nedre port

**6**

Anslut ett **HEPA-filter** eller  
**HME/HEPA-filter** till T-  
kopplingens laterala port

**7**

Anslut adaptern (art.nr **555.01**) till  
**filtret**

**8**

Anslut CPAP BOUSSIGNAC till  
adaptern (art.nr **555.01**)

