

# Instruktion för anslutning av HEPA-filter eller kombinerat HEPA/HME-filter till CPAP Boussignac

1

Välj rätt storlek på **ANSIKTSMASKEN** (S/M/L)

- En guide för rätt storlek finns på förpackningens utsida



2

Anslut ett **HEPA-filter** eller **HME/HEPA-filter** till ansiktsmasken.

**HEPA:** High Efficiency Particulate Air Filtration

**HME:** Heat and Moisture Exchanger



3

Anslut adaptorn (art.nr **555.01**) till **filtret**



4

Anslut CPAP **Boussignac** till adaptorn (art.nr **555.01**)

