

PRODUKTBLAD



Produktnamn: nutrisafe2®

Beskrivning: Enteralsprutor flergångs, anpassade för neonatal och barn, med säkerhetskoppling (Nutrisafe 2).

Art.nr	Storlek	Avd.förp (st)	Transp.förp (st)
1012.014	1 ml	100	2400
1012.024	2,5 ml	100	2000
1012.054	5 ml	100	1600
1012.104	10 ml	100	1000
1012.204	20 ml	80	800
1012.604	60 ml	60	240

Material: Polypropylen och syntetisk gummi

Övrig information: Enteralsprutor med säkerhetskoppling som omöjliggör felkopplingar med andra system tex luer-lock. Sprutorna kan rengöras och återanvändas till samma patient upp till 30 gånger (se rengöringsanvisning på nästa sida). Kan inte användas i sprutpump. Samtliga sprutor är fria från silver, PVC och latex.

Produkten är CE-märkt: Ja

RENGÖRINGSANVISNING

Följande process har validerats för rengöring och återanvändning av sprutor i upp till 30 cykler.

-Rengör sprutan omedelbart efter användning med varmt kranvatten (vid ca 50 °C). Dra ut och skjut in kolven flera gånger tills alla spår av näring eller läkemedel har försvunnit från insidan av sprutans spets, cylindern och kolven.

-Ta ut kolven ur cylindern och rengör dem noga var för sig i varmt kranvatten (vid ca 50 °C). Se till att alla spår av smuts avlägsnas från insidan av sprutans spets, cylindern och kolven.

-Skölj cylindern och kolven under kallvattenkranen och skaka av överflödigt vatten.

-Låt kolv och cylinder lufttorka innan de sätts ihop igen.