



Avlägsnande av PPS CT

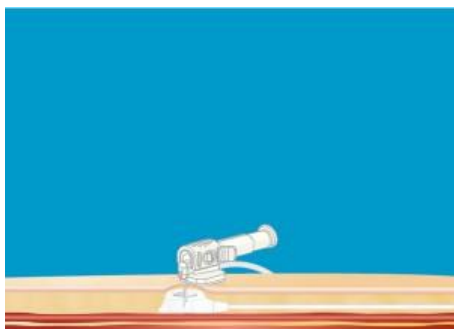

STEG 1: Normal position under användning (horizontalt läge) före avlägsnande.

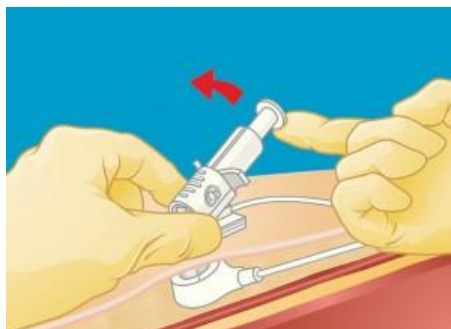

STEG 2: Lyft kolven från dess horisontala position till vertikal position med ett finger samtidigt som basens platta hålls med två fingrar.



STEG 3: Samtidigt som kolven trycks nedåt injiceras sterilt natriumklorid vilket skapar ett positivt avslut. Då nålen är komplett utdragen hörs ett "klick" vilket indikerar att nålen är låst.

Instruktionsfilm gällande PPS CT

Se nedan länk

<https://www.youtube.com/watch?v=ZLAQbfqrEWs>

eller scanna nedan QR kod

